

CAVERNINJECTOR® Autoiniettore

Il CAVERNINJECTOR® è un autoiniettore progettato per la somministrazione sottocutanea e/o intracavernosa di farmaci contenuti in siringhe di vetro preriempite e monouso. Le siringhe sono preriempite con ALPROSTADIL:

- Siringa di vetro monouso da 2 ml (C) con Sistema bloccaggio ago luerlock(E)
- Ago monouso 30Gx1/2" or 0.3mm x 13mm (D)

Il CAVERNINJECTOR® può essere utilizzato con la siringa di vetro monouso preriempita contenuta nella confezione del CAVERJECT prodotto dalla Pfizer.

Dose massima iniettabile con l'autoiniettore : 1ml


Particolari del Caverninjector

Particolari : A = Corpo Inferiore B = Corpo Superiore F = Pulsante azionamento
G = Ghiera di sicurezza H = Pulsante avanzamento siringa L = Finestra visualizzazione fine farmaco
M = Puntale regolazione profondità dell'ago



Istruzioni per l'uso Preparazione

AVVERTENZA: prima dell'uso assicurarsi che l'autoiniettore sia in perfette condizioni e funzionante

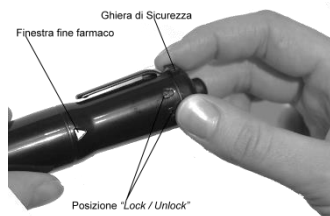


- Mettere in sicurezza l'autoiniettore per evitare scatti accidentali ruotando la *Ghiera di Sicurezza (G)* fino al raggiungimento del simbolo "Lock"
- Svitare il Caverninjector



- Caricare il pistone del Caverninjector: introdurre nel *Corpo Superiore (B)* il puntale del *Corpo inferiore (A)* ed esercitare una leggera pressione fino ad avvertire lo scatto (click) di avvenuto caricamento

- Preparare la siringa preriempita con il giusto dosaggio da iniettare prescritto dal medico specialista

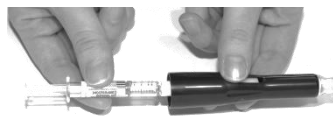

- Inserire la siringa, con la protezione dell'ago attiva, nel *Corpo Inferiore (A)* bloccando con il pollice il *Pulsante per l'avanzamento della siringa (H)*

- Avvitare i due *Corpi* dell'autoiniettore. Non forzare la filettatura durante l'avvitamento. Il Caverninjector ora è pronto per l'uso e se la *Ghiera di Sicurezza* è nella posizione "Lock" sono evitati gli scatti accidentali.

Puntale removibile trasparente tipo "B" = 8,5 mm profondità penetrazione ago



- La profondità di penetrazione dell'ago può essere regolata con i *Puntali (M)* trasparenti removibili in dotazione. Sono possibili due differenti regolazioni dell'ago:

- Puntale siglato "B" = 8,5 mm di profondità dell'ago

- Puntale siglato "C" = 6,5 mm di profondità dell'ago

Il Caverninjector ora è pronto per l'uso.

Iniezione



- Tenere l'autoiniettore in posizione verticale e puntando verso il basso spingere il *Pulsante avanzamento siringa (H)* per far fuoriuscire la protezione dell'ago.

- Rimuovere la protezione dell'ago

- Rilasciare il *Pulsante avanzamento siringa (H)* e la siringa per effetto della molla interna rientrerà nel corpo dell'autoiniettore.

- Rimuovere il blocco sicurezza ruotando la *Ghiera di Sicurezza (G)* fino al simbolo "Unlock"

- Pulire la zona dove si effettua l'iniezione con un tampone imbevuto di disinfettante

- Posizionare il Caverninjector perpendicolarmente alla zona di iniezione e con il puntale trasparente appoggiato alla cute. La *Finestra di visualizzazione fine farmaco (L)* deve essere rivolta verso di voi

- Premere il *Pulsante di azionamento (F)* e attendere la completa erogazione del farmaco fino alla comparsa del pistone nella *Finestra di visualizzazione di fine farmaco (L)* dopo circa 10 sec dallo scatto.



- ## Dopo l'iniezione
- Quando l'iniezione è terminata sollevare lentamente il Caverninjector fino alla completa fuoriuscita dell'ago dal punto di iniezione.
 - Effettuare una leggera pressione sul punto di iniezione con un tampone imbevuto di disinfettante.

AVVERTENZA: in caso di sanguinamento continuare ad esercitare la pressione fino all'arresto dello stesso.

- Inserire la sicura
 - Svitare i due corpi dell'autoiniettore
 - Rimuovere la siringa
 - Rimettere il cappuccio di protezione dell'ago
 - Gettare la siringa
 - Riporre l'autoiniettore nell'apposito contenitore
- La siringa e l'ago possono essere utilizzati una sola volta e gettati negli appositi contenitori per lo smaltimento.

Conservazione e Manutenzione

Il Caverninjector deve essere trattato con cura evitando situazioni che possano danneggiarlo. Proteggerlo dalla polvere e conservarlo quanto più possibile nel suo astuccio. Per la pulizia usare del cotone imbevuto con detergente delicato. Per evitare di danneggiarlo non lavarlo, lubrificarlo o immergerlo nell'alcool. Eliminare lo sporco o la polvere con uno spazzolino morbido.

Il Caverninjector deve essere utilizzato secondo quanto descritto nelle istruzioni d'uso. Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati dall'uso improprio del Caverninjector.

Precauzioni di sicurezza

- ✓ Non tentare di riparare l'autoiniettore difettoso
- ✓ Non scaricare l'autoiniettore a vuoto senza siringa perché si potrebbe danneggiare il meccanismo di aggrancio del pistone
- ✓ Non rivolgere l'autoiniettore verso sé stesso o verso gli altri.
- ✓ Prima dell'utilizzo assicurarsi del buon funzionamento del Caverninjector

Fabbricante e Distributore:

ANDROSYSTEMS SRL
Via Carlo Muscetta, 224
00139 Roma
☎ +39 6 25392811

clienti@androsystems.it

CE 0373

IST CV 01/19

10/06/2019